

KURZANLEITUNG FÜR CHOLESTECH LDX

Messung der externen Qualitätskontrolle im Rahmen des Herzcheck®

1 Vorbereitung

- Gerät einschalten
- Optics Check durchführen



2 Umstellen auf „Serum“ Modus

- «Stop» drücken bis auf der Anzeige die Sprache erscheint.
- mehrmals «Run» drücken bis in der Anzeige «Vollblut» steht.
- drücken Sie nun die «Data» Taste bis Sie «Serum» eingestellt haben!
- mit « Stop » Taste bestätigen

DAS GERÄT IST ERST JETZT ZUR MESSUNG BEREIT

3 Serum in die Kassette pipettieren

- Die Kontrollprobe durch mehrmaliges Kippen mischen.
- gelbe Plastikspitze (40 µl) auf die grüne Pipette aufsetzen
- Knopf der Pipette runterdrücken
- Pipette senkrecht eintauchen und Knopf der Pipette langsam loslassen
- Pipette senkrecht über den Probeauftrag der Kassette halten
- Knopf langsam drücken. Probe langsam in die Öffnung in der Mitte der Kassette eingeben, ohne Luftblasen zu bilden
- Knopf unbedingt noch gedrückt halten und Pipette von der Kassette wegziehen
- erst jetzt Knopf loslassen



4 Messung

- Drücken Sie auf die «Run» Taste um das Kassettenfach zu öffnen.
- Legen Sie nun die Kassette in das Fach ein und drücken Sie die « Run » Taste
- Die Testzeit beträgt nun ca. 5 Minuten



5 Abgabe der Ergebnisse

- Die Ergebnisse werden ausgedruckt sobald der Test abgeschlossen ist. Etikette auf Optics Check Protokoll aufkleben
- Um die Ergebnisse der externen Qualitätskontrolle elektronisch (EQAcom) abzugeben, folgen Sie den spezifischen Angaben, die Sie mit der Probe erhalten haben



6 Rückstellung auf „Vollblut“ Modus

- Vergessen Sie nun nicht das Gerät wieder auf Vollblut zurück zu stellen
- Vorgehen wie unter Punkt 2 – und dokumentieren dies auf Ihrem Protokoll !

