



CSCQ Ringversuch zur 5 Leukozyten-Subpopulationen Bestimmung

Anleitung für Sysmex XE-2100

Um eine korrekte 5 Leukozyten-Subpopulationen Bestimmung zu erhalten, bitten wir Sie diese Anleitung zu befolgen:

1. Einstellung am Sysmex XE-2100 Gerät:
 - a. „Manual Mode“ wählen
 - b. „Sample No“: **QC-123**
 - c. „Mode“: 1: Manual
 - d. „Discrete“: 4: CBC+DIFF
 - e. „Enter“
2. Messung im manuellen Modus durchführen.
3. Die Resultate werden nur im „Explorer“ gespeichert.