


CSCQ Contrôle de qualité externe pour la détermination des 5 sub-populations de leucocytes


Instructions pour Sysmex XS-1000i et Sysmex XS-800i

Afin d'obtenir un résultat correct des 5 sub-populations de leucocytes, nous vous prions de bien vouloir suivre ces instructions:

1. Saisie échantillon:
 - a. Choisir „Manuel“ (1)
 - b. „No Echantillon“: QC-123 (2)
 - c. „Type d'analyse“: NUM+DIFF (3)
 - d. „OK“ (4)

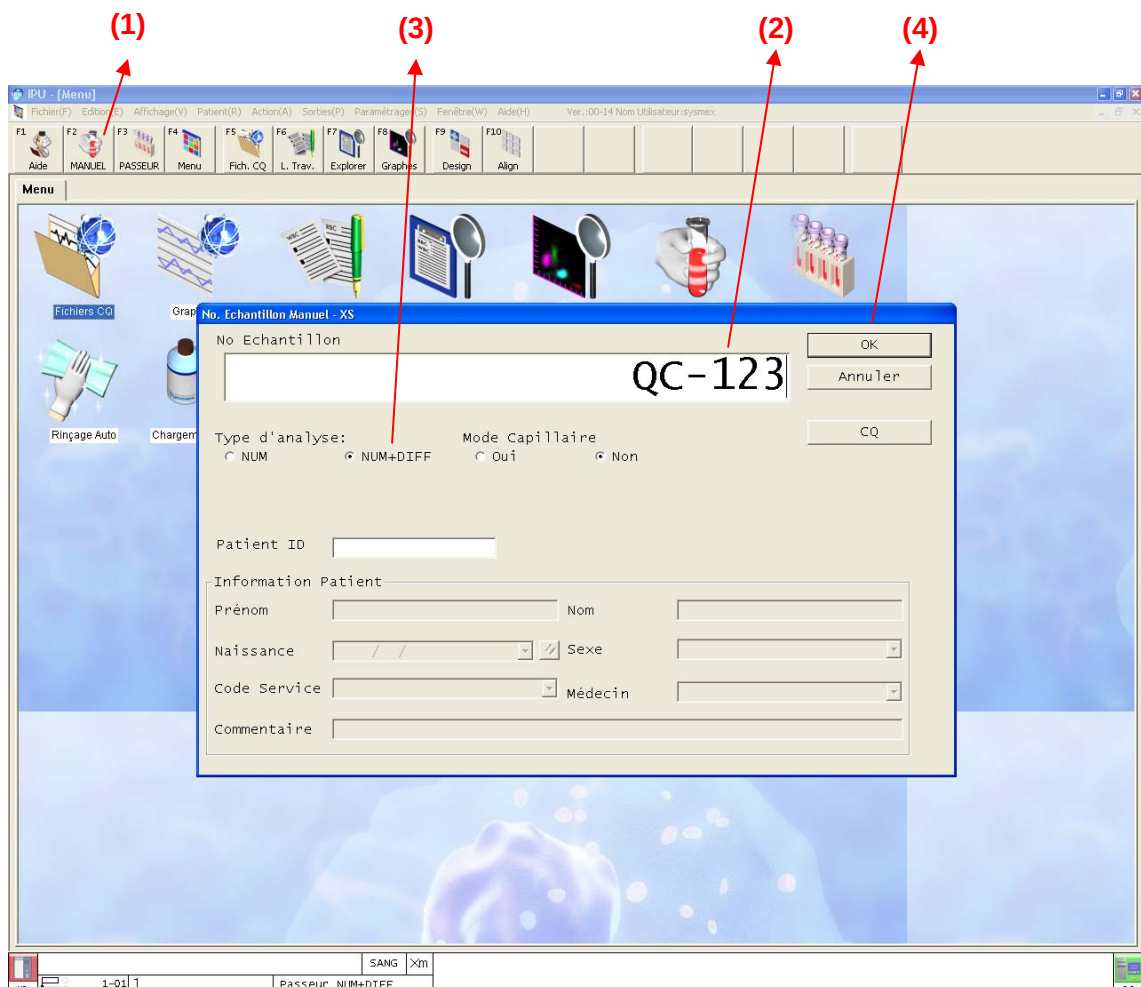

2. Quand la fenêtre „Aide“ (5) s'ouvre
 - a. Arrêter l'alarme (6)
 - b. Choisir „Accepter“ (7)
 - c. et „Fermer“ (8) la fenêtre

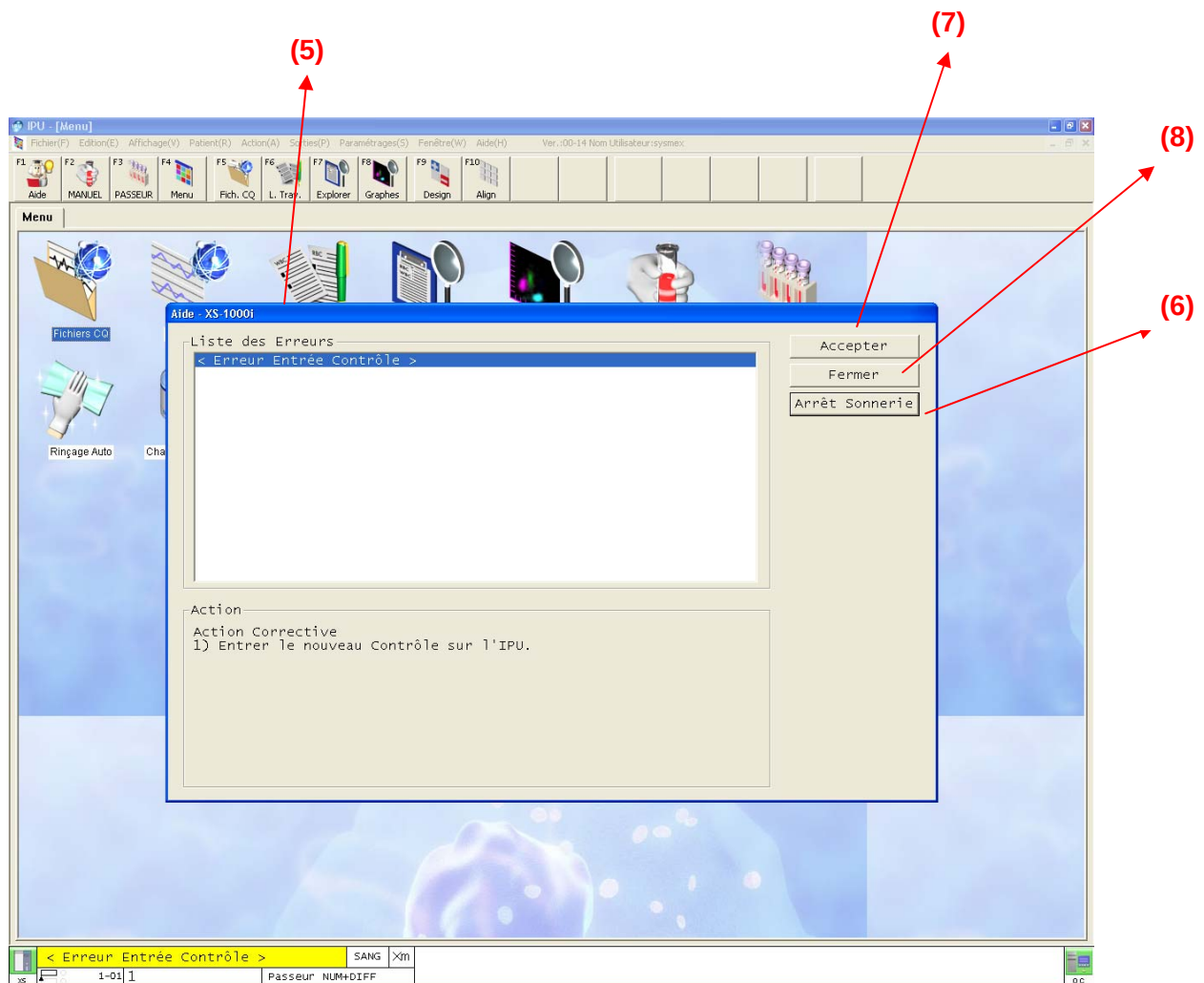

3. Effectuer la mesure en mode manuel.
4. Les résultats seront mémorisés dans „Explorer“.