




Guide pratique pour la reconstitution de l'échantillon de contrôle T1 pour le dosage des TP %, TP INR, aPTT, fibrinogène et temps de thrombine

- L'échantillon de CQE (T1) pour la coagulation est composé d'un flacon de plasma lyophilisé.
- Avant reconstitution, laisser l'échantillon, ainsi que l'eau distillée, revenir à température ambiante (20 - 25°C).

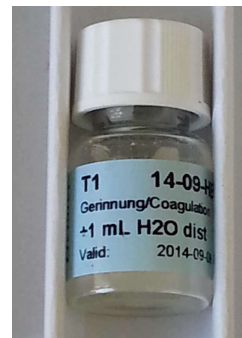

- Ouvrir le flacon, en faisant attention de ne pas perdre de lyophilisat.
- Reconstituer l'échantillon T1 avec **exactement 1 mL d'eau distillée** à l'aide d'une pipette certifiée ou garantie, sans toucher le lyophilisat (laisser couler l'eau le long de la paroi intérieure du flacon).



- Reboucher le flacon et laisser reposer **30 minutes** sans agitation.
- Homogénéiser délicatement et vérifier que la totalité du lyophilisat soit correctement dissoute avant emploi.
- Attention, utiliser rapidement l'échantillon T1 ainsi reconstitué.
- Tester le contrôle comme un échantillon de patient.

