




Guida pratica per la ricostituzione del campione di controllo T1 per il dosaggio dei parametri TP %, TP INR, aPTT, fibrinogeno e tempo di trombina

- Il campione di CQE/VEQ (T1) è una provetta contenente plasma liofilizzato.
- Prima della ricostituzione, portare la provetta T1 e l'acqua distillata a temperatura ambiente (20 – 25 °C).

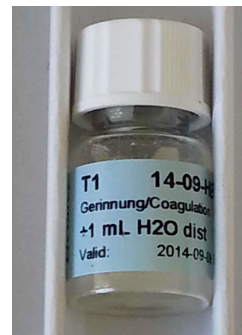

- Aprire la provetta delicatamente per non perdere il plasma liofilizzato.
- Ricostituire il campione T1 aggiungendo **esattamente 1 mL di acqua distillata** mediante una pipetta certificata o garantita, senza toccare il plasma liofilizzato (depositare l'acqua lasciandola scorrere lungo la parete della provetta).



- Avvitare il tappo e lasciar riposare la provetta durante **30 minuti** senza agitare.
- Omogeneizzare delicatamente il contenuto e verificare che tutto il plasma liofilizzato sia correttamente sciolto prima dell'uso.
- Attenzione: effettuare ora i dosaggi rapidamente.
- Dosare i parametri come se fosse un campione di paziente.

