



Per il dosaggio dei parametri di co-ossimetria con il campione di CQE (VEQ) e gli apparecchi I-Stat e I-Stat 1 (Hb, Hct), seguire la procedura descritta qui sotto.

Portare il campione a temperatura ambiente durante 15 minuti prima di effettuare le misure.



Non premere sul pistone.




Capovolgere delicatamente il campione, tappo verso il basso, agitare, capovolgere nuovamente, tappo verso l'alto e agitare.




Il campione è pronto per l'uso. Il campione è stabile durante 15 minuti.

Trasferire il contenuto del campione in un contenitore.

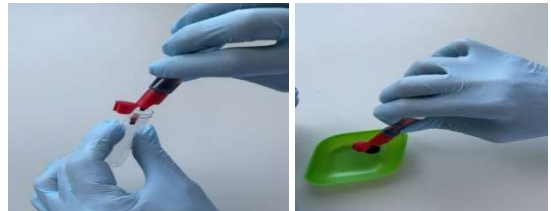

Prelevare il campione e analizzare.

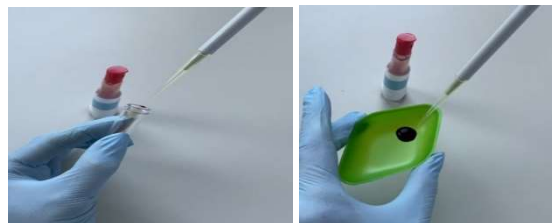

Misurare come se fosse un campione di paziente.

